

PHILIPS



Infraphil®

HP 2030

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die auf dem Lampenkolben vermerkte Spannung mit der des örtlichen Lichtnetzes übereinstimmt.

Arbeitsweise der Infrarotlampe

Die Infrarotlampe erzeugt infrarote Strahlung. Diese Strahlung hat die Eigenschaft, tief in die Haut einzudringen.

Durch die so erzeugte Wärme erweitern sich die Blutgefäße, und es setzt eine stärkere Durchblutung ein: Es werden mehr Aufbaustoffe an die bestrahlte Stelle herangeführt, und der Körper baut die „Schlacken“ in erhöhtem Maße ab.

Durch die Einwirkung von Wärme erweitern sich die Hautporen. Aufgrund dieser Eigenschaften ist die Infrarotlampe sowohl für eine therapeutische als auch kosmetische Behandlung geeignet.

Therapeutische Behandlung

Infrarot-Strahlen können helfen: bei Erkältungen, rheumatischen Beschwerden, Muskelschmerzen.



Wir empfehlen, vor der Behandlung den Arzt zu befragen.

A. Bestrahlungsabstand: Der Abstand sollte so gewählt werden, daß die Wärme als angenehm empfunden wird (± 30 cm).

B. Bestrahlungsdauer: Mit einer Behandlung von täglich 2 x 15 Min. erzielt man die besten Ergebnisse. Die Behandlung kann beliebig oft wiederholt werden.

Kosmetische Behandlung

Nach Entfernen des Make-up öffnen sich die Hautporen unter Einwirkung von Infrarot-Strahlen: Dies ermöglicht eine tiefenwirksame Reinigung der Haut. Kosmetische Präparate werden von der Haut schneller aufgenommen, wenn man die Infrarotlampe verwendet.

Bestrahlungsabstand (wie bei A).

Wichtig

● Schmerzstillende Mittel setzen die Schmerzempfindbarkeit der Haut herab. Sie sollten daher unter Einwirkung dieser Medikamente eine Infrarot-Bestrahlung unterlassen (**fragen Sie Ihren Arzt**).

● Bei Bestrahlung des Gesichtes die Augen schließen.

● Vermeiden Sie eine plötzliche Abkühlung unmittelbar nach der Bestrahlung.

● Stellen Sie das Gerät während der Bestrahlung auf eine ebene Unterlage. Hängen Sie es nicht an die Wand oder an die Decke (siehe Seite 2).

● Kein Wasser auf das Gerät spritzen.

● Benutzen Sie das Gerät nicht in Bade- oder Duschräumen.

● Bringen Sie keine feuergefährlichen Gegenstände in den Strahlungsbereich; Kämme, Brillengestelle usw. können sich entzünden, Textilien versengen.

● Die Lampe vor stärkeren Stößen schützen.

● Die Lampe vor dem Aufbewahren einige Minuten abkühlen lassen.

Behandlung von Tieren

Auch für kranke oder verletzte Haustiere kann man die Heilwärme der Infrarotlampe verwenden: z. B. im Falle von Quetschungen, Verstauchungen, Muskelschmerzen (Rennpferde u. Hunde), Ekzemen, kahlen Stellen, Haut- und Zitzenentzündungen, geschwollenen Sprunggelenken sowie schlecht heilenden Wunden. Auch nach dem Trimmen von Hunden erweisen sich Infrarot-Bestrahlungen als günstig.

Reinigung

Die Infrarotlampe mit einem angefeuchteten Tuch reinigen (Netzstecker ziehen). Hierbei muß die Lampe abgekühlt sein.

Bei Auswechseln der Lampe immer die gleiche Bauart mit Schraub-Sockel E 27 verwenden.

GARANTIE

Dieses Gerät ist mit großer Sorgfalt aus einwandfreiem Material hergestellt worden. Wir übernehmen daher für alle Material- und Fabrikationsfehler eine Garantie von EINEM JAHR ab Verkaufsdatum. Sollte sich dennoch ein derartiger Fehler einstellen, dann wenden Sie sich bitte mit dem Garantieschein (siehe Außenseite der Verpackung) an Ihren Händler.

Wenn das Gerät unsachgemäß benutzt, an eine falsche Spannung angeschlossen oder beschädigt worden ist, bzw. wenn unbefugte Eingriffe vorgenommen worden sind, verfällt jede Garantie.

Die Garantie verfällt auch dann, wenn bei dafür in Betracht kommenden Apparaten die Aufstellung und der Anschluß durch nicht dazu befugte Personen vorgenommen wurden. Voraussetzung der Garantieleistung ist, daß der Garantieschein beim Ankauf ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben wird.

Zu irgendwelchen weitergehenden Service- oder Schadenersatzleistungen sind wir nicht verpflichtet.