# www.infraphil.info





































www.infraphil.nl





### Infraphil

esportes







O Infraphil é um moderno e prático aparelho doméstico que, ligado a uma tomada elétrica, emite raios infravermelhos, semelhantes aos raios solares, benéficos no tratamento de numerosas enfermidades curáveis pelo calor. Resfriados, dores musculares e nevrálgicas, contusões, ferimentos, furúnculos, dores de dente e de cabeça etc.. podem ter a cura apressada e, em muitos casos, ser completamente eliminados com aplicações dos raios infravermelhos do Infraphil.

A prática dos esportes provoca, às vêzes, contusões e pancadas, distensões musculares, torções que podem degenerar em problemas mais sérios se não forem convenientemente medicados. A ação dos raios infravermelhos do Infraphil provoca maior circulação sanguínea, possibilitando maior rapidez no processo de eliminação de dores na parte afetada.

nfraphil to tratamento le resfriados

sinusites

As crianças e o Infraphil Reumatismo e dores musculares podem ser tratados com Infraphil







Os resfriados e sinusites, quando estão no início, podem, na maioria dos casos, ser completamente suprimidos com aplicações do Infraphil. No entanto, mesmo que a doença esteja em estado adiantado, é cossível diminuir sua intensidade e apressar a cura com a ação dos raios infravermelhos do Infraphil.

São comuns os tombos, machucaduras e pequenas feridas nas crianças. Para combater ésses males e impedir agravamentos, as aplicações diárias do Infraphil resultam benéficas. Também para picadas de insetos, dores de dente e inúmeras outras enfermidades, Infraphil proporciona alívio e apressamento de cura.

Para tratamento das incômodas dores musculares e reumáticas, as aplicações dos raios infravermelhos do Infraphil produzem bons resultados. Logo após a primeira aplicação, as dores diminuem e gradativamente vão desaparecendo com as novas aplicações.

### recomendações úteis

- O Infraphil somente deve ser ligado na voltagem indicada no aparelho: 110 ou 220 Volts.
- Recomenda-se uma distância mínima de 25 cm da pele, quando das aplicações do Infraphil.
- Cada aplicação deve durar de 10 a 20 minutos, dependendo da orientação médica.
- Se o paciente tiver pele sensível, recomenda-se o uso de um creme qualquer, após as aplicações.
- Não se devem usar analgésicos antes da utilização da lâmpada Infraphil, pois êles diminuem a sensibilidade da epiderme ao calor.
- Objetos de plástico e outros de fácil combustão não devem estar dentro do raio de ação da lâmpada.



#### S.A. PHILIPS DO BRASIL

Matriz: Av. Senador Queirós, 312 - Caixa Postal 8 681 - São Paulo FILIAIS:

Guanabara Rua Almirante Baltazar, 281 - Caixa Postal 1 489

São Paulo Al. Cleveland, 584 - Caixa Postal 8147

Belo Horizonte Rua Aquiles Lóbo, 544 - Caixa Postal 318

Recife Rua Imperial, 1898 - Caixa Postal 612
Pôrto Alegre Rua Hoffmann, 246 - Caixa Postal 122

Curitiba Av. 7 de Setembro, 3465 - Caixa Postal 206

Salvador Praça Rodrigues Lima, 7 (Largo da Vitória) - Caixa Postal 1199
Brasilia Super Quadra 109 - Lojas 16 e 17 - S.C.L. - Caixa Postal 892

ESCRITÓRIOS DE VENDAS:

Fortaleza Rua General Sampaio, 1255 Santos Rua Julio Conceição, 197



# www.infraphil.info



































www.infraphil.nl